

## Quantités de liquide recommandées pour les réservoirs et les cuves

Réservoir	CAE Apollo Soins infirmiers	CAE Apollo préhospitalier	CAE Ares	CAE Aria	CAE Juno	CAE Lucina	CAE Luna
Voies aériennes	40 ml				30 ml		
Gastrique	60 ml				150 ml		
Système urinaire				> 4 ml à l'amorçage	60 ml de liquide 80 ml d'air	70 ml	10 ml
Stomie					200 ml		
Trauma/réservoir de sang	1,5 L	1,5 L					
Amorçage IV	60 ml	60 ml	Utilisation de Vega prête	Antécubital 20 ml Jugulaire et main 20 ml		50 ml	20 ml
Réservoir pour hémorragie						2 L	
Ombilical							15 ml
Glycémie par prélèvement au doigt				0,2 ml			